



Máscara FFP2 e KN95 PURISM s/ válvula

Ref: DEXMASNK95DAD



Características Técnicas:

Composição: Poliéster

Cores: Branco

Nível de Proteção: FFP2

Tamanhos: Tamanho único

Descrição:

- Máscara de proteção respiratória FFP2 e KN95 descartável sem válvula: adequada para proteção contra a COVID-19;
- Nível de filtração de poeira, aerossóis sólidos e líquidos (tamanho >0,3 micron) >95%;
- Com clip nasal, ajuste rápido e fácil;
- Sem látex;
- Certificado pelo BSI (Organismo Notificado n°2797) em conformidade com a diretiva EPI 2016/425 e recomendação 2020/403.
- **Certificado FFP2 aprovado pela SGS.**

Acondicionamento:

- 5 máscaras por embalagem;
- 4 embalagens por caixa;
- 48 caixas por caixote;
- 960 máscaras por caixote.

Instruções de Utilização:

Colocação da máscara:

1. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica antes de manipular.
2. É conveniente fazer uma reentrância no clipe nasal, como mostra a figura para uma colocação correta.
3. Inserir a parte superior da máscara. Segurar a máscara do exterior e estender os elásticos de ambos os lados da máscara. Estender os elásticos de ambos os lados das orelhas.
4. Ajustar a banda nasal ao nariz e verificar se a máscara está corretamente posicionada. A máscara está bem selada e não há desconforto respiratório.
5. Uma vez no lugar, não tocar na máscara com as mãos. Se precisar de tocar na máscara, deve voltar a lavar as mãos.



Remoção da máscara:

1. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica.
2. Remover a máscara sem tocar na parte da frente da máscara.
3. Descarte-o num recipiente com um saco de plástico.
4. Lavar as mãos com água e sabão e/ou solução hidroalcoólica.



Exemplos de Aplicações: Esta máscara não é um dispositivo médico. Protege contra partículas, vírus, bactérias, aerossóis sólidos e/ou líquidos identificados como perigosos ou irritantes. **(A utilização desta máscara não dispensa o cumprimento das medidas de distanciamento social e de outras medidas estabelecidas.)**