



MÁSCARA SOCIAL REUTILIZAVEL AIRPRO II MOD. C NIVEL 3

Ref: DEXMAS3DOBAIR



Características Técnicas:

Composição: **Tecido:** Elasanek 150

Composição: Olefine - Antiestático

Peso: 150 gr/m²

Cores: Azul, Branca e Preta

Tamanhos: Tamanho Único (Adulto)

Nível de Proteção: Nível 3 - Máscaras de Uso Geral

Descrição:

Rentabilidade:

Reutilizável, o que origina uma alta durabilidade;
Propriedades permanentes;
Tecido com características inerentes;
Tecido de baixa absorção e secagem rápida (poupança na manutenção).

Comodidade:

0% algodão;
0% fibras hidrófilas.

Ecológico:

100% reciclável: todos os componentes são reciclados;
Reutilizável: não gera resíduos.

Dicas de utilização da máscara:

1. Por razões de conforto e higiene, é recomendado não usar a máscara por mais de 4 horas;
2. A máscara deve ser lavada sempre que ficar suja, húmida ou não puder ser colocada corretamente no rosto;
3. A máscara não deve ser usada se estiver suja ou húmida;
4. No caso de ser armazenado temporariamente, deve ser evitado o contacto com qualquer superfície;
5. Também não deve ser colocado em posição de espera na testa ou debaixo do queixo durante e após cada utilização.

Instruções de lavagem:

Para que a peça mantenha 100% do seu desempenho, é essencial seguir estas recomendações de lavagem.


1. Aceita qualquer detergente doméstico ou desinfetante multiusos, incluindo lixívia;
2. Recomendamos a lavagem manual e a secagem ao ar;
3. Lavar dentro de um cesto de proteção;
4. Lavar entre 40°C e 60°C;
5. Permite o uso de lixívia;
6. Secar a seco: recomendado 40°C duração máxima: 5 minutos a baixa temperatura.



Como colocar a máscara?



Antes de colocar a máscara, lave as mãos com uma **solução hidroalcoólica ou com água e sabão**.

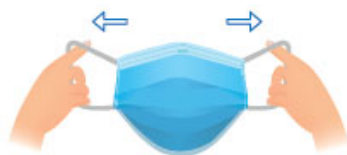


Toque na máscara **SEMPRE** pelos elásticos, **não toque na superfície têxtil da máscara**. Puxe os elásticos para colocar a máscara.



Cubra a boca e o nariz com a máscara e certifique-se de que **não existem espaços entre o seu rosto e a máscara**.

Como remover e descartar a máscara?

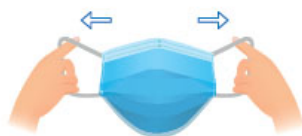

Evite tocar nas partes têxteis de fora da máscara. Puxe os elásticos por trás para remover a máscara.



Dobre a máscara em duas metades, **sempre a tocar na parte têxtil do interior**, nunca a parte exterior.



Fixe a dobra com os elásticos e lave-a de acordo com as instruções recomendadas. **Recomendamos a lavagem à mão e a secagem ao ar**.



Lave as mãos novamente com **desinfetante à base de solução hidra alcoólica ou com água e sabão**, sempre após o manuseamento.

Exemplos de Aplicações:

Esta máscara deve ser usada como **complemento das medidas de proteção e higienização** recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamental para o controlo da COVID-19.

Normas:

Este dispositivo **não é um dispositivo médico** na aceção da Diretiva 93/42 ou do Regulamento EU/2017/745, nem é um equipamento de proteção pessoal na aceção do Regulamento EU/2016/425;

16879/2020 CITEVE;

EN 1149-3, EN 13034.

