

Produto - MASK01

Máscara têxtil destinada à utilização por profissionais que não sendo de saúde estão expostos ao contacto com um elevado número de indivíduos.

NÍVEL
2

Este produto não é um dispositivo médico; não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento EU/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual (regulamento EU/2016/425).

Uso

Esta máscara deve ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas, e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da Covid-19. Para mais informações, consultar <https://covid19.min-saude.pt>


A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a orientação da DGS n° 019/2020 de 03/04/2020.

Matérias Primas

Exterior: 1 camada de TNT 100% PP
Interior: 1 camada de TNT 100% PP
Elástico Espalmado em poliéster
Ajuste ao nariz: Clip Metálico
Composição: 100% Polipropileno

Descrição

Máscara de 2 camadas, com pregas permanentes, com ajuste ao nariz através de clip metálico, com objectivo de evitar a propagação de partículas expelidas pelo seu utilizador.

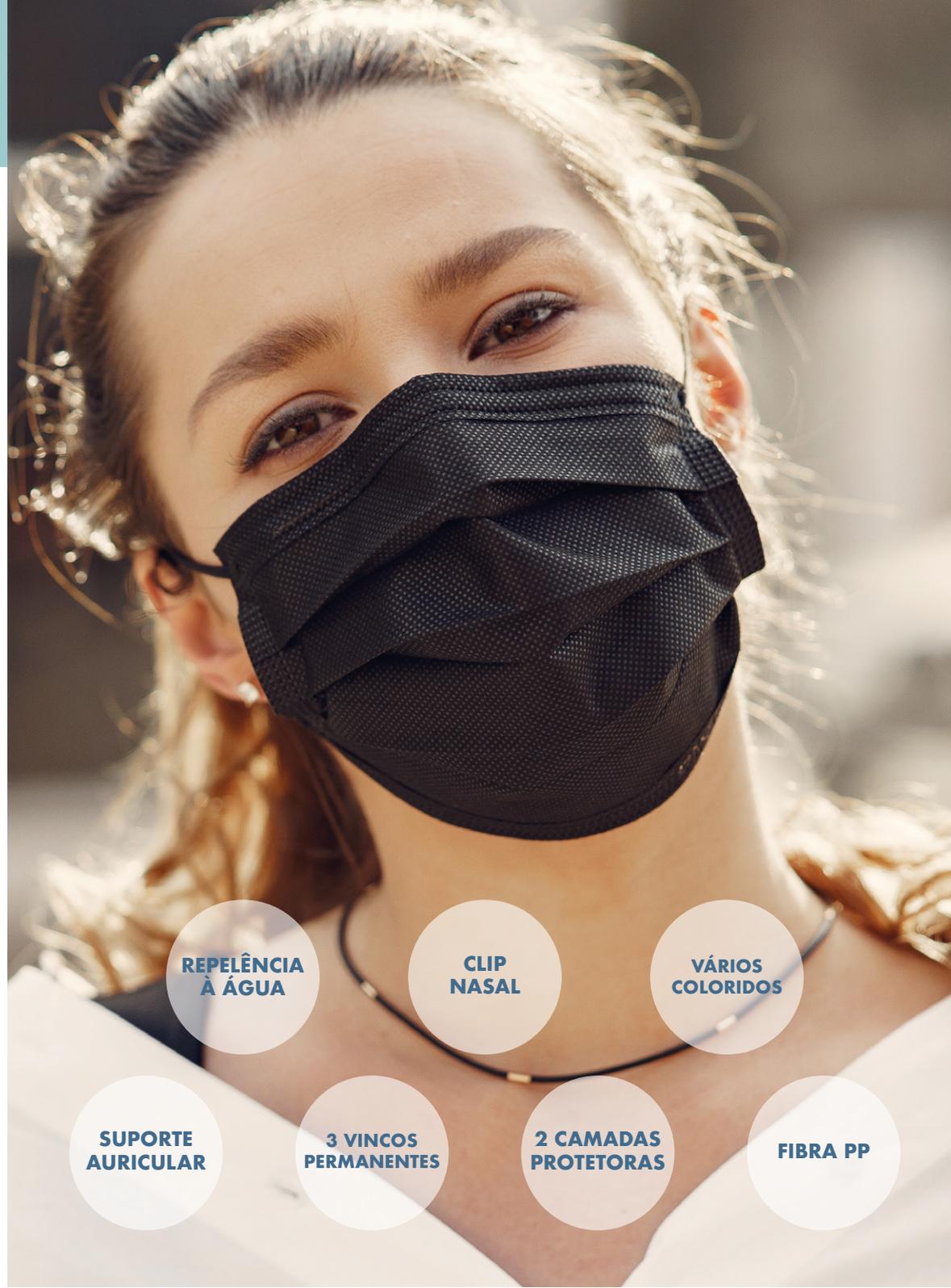

REPELÊNCIA
À ÁGUA

CLIP
NASAL

VÁRIOS
COLORIDOS


SUPOORTE
AURICULAR

3 VINCOS
PERMANENTES

2 CAMADAS
PROTETORAS

FIBRA PP

Medidas

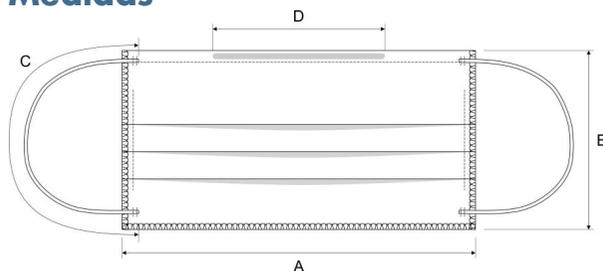

A > 17,5 -20 cms

B > 9,5-11 cms

C > 14-17 cms

D > 9-12 cms


Instruções de uso

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.

A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
- Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;
- Em momento algum, a máscara deve ser guardada à volta do pescoço para ser reutilizada;
- A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
- Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara

- > A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir o número de ciclos de lavagem indicados pelo fabricante.
- > A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem.
- > A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial contaminação (inicialmente ou após lavagem).
- > A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso.
- > Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.
- > No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto "conservação e limpeza" e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.

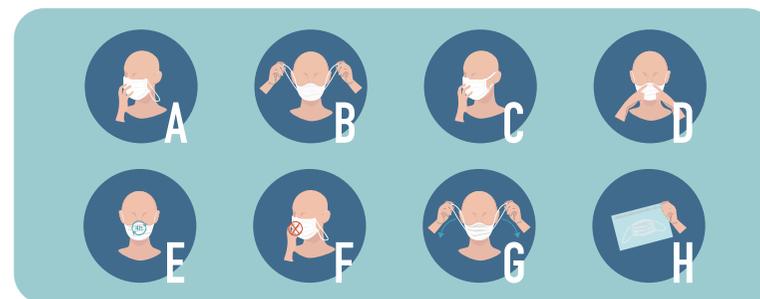

Conservação e limpeza

- > Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de N° proteção da máscara: 25
- > As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.

